

NX

* この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

** 2025年02月改訂（第5版）

* 2023年05月改訂（第4版）

CL SP-D「ヤマサ」NX用 コントロールセット

【一般的な注意】

- 1) 本製品は、CL SP-D「ヤマサ」NX（別売）専用のコントロールです。それ以外の目的に使用しないでください。
- * 2) 使用に際しては、CL SP-D「ヤマサ」NX（別売）の電子化された添付文書ならびに使用機器の取扱説明書および電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。

【形状・構造等】

コントロール（溶液 2濃度 各1本）

各コントロールのSP-D濃度は、同梱の表示値ラベルに表示してあります。

コントロール NX 1

コントロール NX 2

【用法・用量（操作方法）】

調製方法

そのまま使用します。

【使用上または取扱上の注意】

1. 使用上の注意

- 1) 本製品は室温に戻してから使用してください。
- 2) 開封した本製品を保存する場合は密栓し、貯蔵法に従って保存して定められた期間内に使用してください。
- 3) 使用期限を過ぎた本製品の使用は避けてください。
- 4) 異なるロットの本製品を混和して使用しないでください。

2. 取扱上の注意

使用後の容器は、廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法：2～8℃で保存
2. 有効期間：製造日から12箇月（使用期限は外箱に表示）

【包装単位】

コントロール NX 1 2mL×1本

コントロール NX 2 2mL×1本

商品コード：61583-5

【問い合わせ先】

** キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社

学術担当

〒104-6004 東京都中央区晴海 1-8-10

TEL：03-6219-7608（ダイヤルイン）

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

** 販売元 キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社

東京都中央区

製造販売元



ヤマサ醤油株式会社

千葉県銚子市新生町2-10-1

TEL 0479-22-0095